



Check list fauteuil dentaire

Prévention du risque infectieux
en cabinet dentaire

Check List d'ouverture

Purge

Fauteuil dentaire 3 à 5mn

Instrumentation dynamique 20-30s

Environnement / surfaces

Nettoyer et désinfecter* fauteuil, unit, tablette, plan de travail, siège scialytique

Vérification du fonctionnement

scialytique et Fauteuil

Entre 2 patients

Purge

Fauteuil dentaire 30s

Instrumentation dynamique 20-30s

Environnement / surfaces

Nettoyer et désinfecter* fauteuil, unit, tablette, plan de travail, siège scialytique

Crachoir

Faire couler l'eau, nettoyer et désinfecter l'extérieur du crachoir et le filtre

Check List de fermeture

Purge

Fauteuil dentaire 30s

instrumentation dynamique 20-30s

Environnement / surfaces

Nettoyer et désinfecter* fauteuil, unit, tablette, plan de travail, siège scialytique

Crachoir

Faire couler l'eau, nettoyer et désinfecter l'extérieur du crachoir et le filtre

Mise en veille

Scialytique et Fauteuil

Pour en savoir plus

Article sur l'entretien des Units dentaires le fil dentaire

<https://www.lefildentaire.com/articles/clinique/entretien-des-units-dentaires/>